

CarePump Move8PRO

Nowoczesny 8-komorowy aparat do masażu limfatycznego działający na zasadzie sekwencyjnego masażu uciskowego do zastosowań w rehabilitacji i medycynie estetycznej. Urządzenie mobilne dzięki kompaktowej budowie, niskiej wadze i akumulatorowemu zasilaniu



Opis produktu

CarePump Move8PRO to jedyne urządzenie do presoterapii na rynku łączące funkcjonalności urządzeń stacjonarnych z kompaktową budową i akumulatorowym zasilaniem charakterystycznym dla urządzeń mobilnych. Move8PRO to odpowiednik aparatu Expert8 z serii Advanced w małej obudowie - doskonałe połączenie zaawansowanych funkcjonalności z kompaktowym designem.

CarePump Move8PRO ze względu na zaawansowane funkcjonalności oraz 15 programów terapeutycznych opracowanych przez Polskie Towarzystwo Limfologiczne dedykowany jest do profesjonalnego zastosowania w medycynie, rehabilitacji i odnowie biologicznej. Inteligentna funkcja gradientu, interwał, hold, indywidualne ciśnienie dla każdej z komór w mankiecie oraz możliwość zaprogramowania własnych algorytmów zabiegowych umożliwiają precyzyjne dostosowanie parametrów masażu do potrzeb każdego pacjenta. Akumulatorowe zasilanie i wygodny plecak sprawiają, że jest urządzeniem pierwszego wyboru dla fizjoterapeutów mobilnych. Aparat 8-komorowy, polskiej produkcji, marki CarePump.

CarePump Move8PRO jest aparatem o zaawansowanych ustawieniach szczególnie polecanym do profesjonalnego użytku w gabinetach lub na wizytach domowych u pacjentów. Do zastosowania przez użytkowników prywatnych rekomendujemy wybór aparatu z serii Economic, bardziej przystępnego cenowo i posiadającego podstawowe ustawienia, np. Lite8 lub Lite6.

Cena obejmuje: urządzenie CarePump Move8PRO oraz plecak do bezpiecznego i wygodnego transportu urządzenia.

Zalety aparatu CarePump Move8PRO

- Polska produkcja i serwis
- Międzynarodowa dystrybucja
- 15 trybów masażu - algorytmów zabiegowych
- Programowanie własnych algorytmów
- Programy ulubione
- Funkcja PROGRADIENT SYSTEM (ustawienia gradientu/spadku ciśnienia w kolejnej pompowanej komorze)
- Technologia SUPERFLOW 5 poziomów szybkości przepływu
- Precyzyjna regulacja parametrów
- Stały pomiar ciśnienia w komorach
- Możliwość ustawienia indywidualnego ciśnienia w każdej komorze
- Możliwość wyłączenia dowolnych komór
- Funkcja Interwał (regulacja przerwy pomiędzy cyklami): 1-50s
- Funkcja Hold (regulacja utrzymania ciśnienia w komorach)
- 4 godziny pracy na baterii
- Wydajna pompa o żywotności 10 000h
- Ochrona czasu pracy aparatu kodem czasowym
- Tryb Reverse odwrotnego pompowania komór

Zastosowania aparatu CarePump Move8PRO

Presoterapia rekomendowana jest w przypadku licznych schorzeń obejmujących układ krwionośny i limfatyczny, terapii pourazowej, sportowcom w celu przyspieszenia regeneracji i zapobiegania kontuzjom, a także ze wskazań estetycznych, np. do ujędrniania i redukcji cellulitu.

- dla fizjoterapeutów jako podstawowe wyposażenie każdego gabinetu. Aparat posiada 15 programów terapeutycznych opracowanych przez Polskie Towarzystwo Limfologiczne dedykowanych poszczególnym schorzeniom, m.in. obrzęk limfatyczny, żylny, tłuszczowy, terapia pourazowa, regeneracja itp.,
- dla kosmetyków do zabiegów redukujących cellulit i poprawiających jakość tkanki skórnej, a także po zabiegach liposukcji. Aparat posiada specjalne programy do wykorzystania podczas zabiegów estetycznych: cellulit advanced, ujędrnianie,
- dla fizjoterapeutów mobilnych ze względu na niewielkie rozmiary urządzenia i akumulatorowe zasilanie.

Tryby pracy

CarePump Move8PRO posiada aż 15 różnych trybów pracy (algorytmów zabiegowych), dedykowane różnym schorzeniom, co ułatwia wybór odpowiedniego sposobu pompowania mankietów dla danego pacjenta: 4 programy dedykowane obrzękom limfatycznym, po dwa programy do leczenia obrzęków żylnych i tłuszczowych, terapia pourazowa, cellulit, regeneracja, profilaktyka i relaksacja, masaż globalny i tryb MIX. Algorytmy terapeutyczne zostały opracowane w oparciu o doświadczenie i wiedzę ekspertów z Polskiego Towarzystwa Limfologicznego. Dla każdego z programów wystarczy podać jedynie wartość ciśnienia.



obrzęk limfatyczny 1

Gradient	1 mmHg
Zalecany czas zabiegu	50 min.
Hold	3 s
Interval	3 s

obrzęk limfatyczny 2

Gradient	1 mmHg
Zalecany czas zabiegu	50 min.
Hold	3 s
Interval	3 s

obrzęk limfatyczny 3

Gradient	1 mmHg
Zalecany czas zabiegu	50 min.
Hold	3 s
Interval	0 s

obrzęk limfatyczny 4

Gradient	1 mmHg
Zalecany czas zabiegu	50 min.
Hold	3 s
Interval	0 s

obrzęk żylny 1

Gradient	3 mmHg
Zalecany czas zabiegu	45 min.
Hold	2 s
Interval	3 s

obrzęk żylny 2

Gradient	3 mmHg
Zalecany czas zabiegu	45 min.
Hold	2 s
Interval	2 s

obrzęk tłuszczowy 1

Gradient	2 mmHg
Zalecany czas zabiegu	60 min.
Hold	3 s
Interval	3 s

obrzęk tłuszczowy 2

Gradient	2 mmHg
Zalecany czas zabiegu	60 min.
Hold	3 s
Interval	3 s

terapia pourazowa

Gradient	4 mmHg
Zalecany czas zabiegu	30 min.
Hold	2 s
Interval	2 s

ujędrnianie

Gradient	1 mmHg
Zalecany czas zabiegu	60 min.
Hold	3 s
Interval	3 s

cellulit **advanced**

regeneracja

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

Gradient	4 mmHg
Zalecany czas zabiegu	45 min.
Hold	2 s
Interval	2 s

profilaktyka, relaksacja

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

Gradient	0 mmHg
Zalecany czas zabiegu	60 min.
Hold	2 s
Interval	2 s

masaż globalny

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

Gradient	0 mmHg
Zalecany czas zabiegu	30 min.
Hold	2 s
Interval	5 s

program mieszany

Możliwość połączenia dowolnych programów zabiegowych oraz wybrania liczby powtórzeń dla każdego z nich.

Gradient	1 mmHg
Zalecany czas zabiegu	60 min.
Hold	1 s
Interval	2 s

Dane techniczne:

- Waga: 2,9 kg
- Zasilanie: akumulatorowe 21VDC/1A
- Praca urządzenia na zasilaniu sieciowym: tak
- Ekran: 7" dotykowy, kolorowy wyświetlacz LC
- Wymiary: 290x130x130
- Obsługiwane mankiety: 8-komorowe
- Typ mankietów: overlapping, fishbone (system który zapobiega cofaniu się limfy podczas wykonywania zabiegu)
- Ciśnienie: 20-220 mmHg (precyzyjna regulacja co 1 mmHg)
- Programy zabiegowe: 15 trybów masażu
- Programy własne użytkownika: tak
- Lista programów ulubionych: tak
- Możliwość wyłączenia komór: tak
- Indywidualne ciśnienie w każdej komorze: tak
- PROgradient System: tak (mmHg, %, ciśnienie końcowe)
- SUPERFLOW: tak (regulacja tempa zabiegu 1-5)
- Funkcja Hold (regulacja utrzymania ciśnienia w komorach): 1-50s
- Funkcja Interwał (regulacja przerwy pomiędzy cyklami): 1-50s
- Pojemność akumulatora: 3500 mAh
- Czas pracy akumulatora: ok. 4h
- Wymienny akumulator: tak

Zawartość zestawu:

- Urządzenie do drenażu limfatycznego - 8-komorowe CarePump Move8PRO
- Kabel zasilający
- Plecak

Szeroka oferta mankietów (wyposażenie dodatkowe)

Do wykonania zabiegu konieczne jest dokupienie mankietów na część ciała, na której będzie przeprowadzany zabieg:

- mankiet na nogę lewą 8-komorowy,
- mankiet na nogę prawą 8-komorowy,
- rozdzielacz (umożliwia podpięcie do aparatu dwóch mankietów jednocześnie),
- mankiet na rękę 8-komorowy,
- mankiet na biodra i brzuch 8-komorowy,
- mankiet krótkie spodnie 8-komorowy,
- mankiet długie spodnie 8-komorowy,
- mankiet podwójny na rękę, barki i klatkę piersiową 8-komorowy,
- mankiet na lewą rękę, bark i pierś 8-komorowy,
- mankiet na prawą rękę, bark i pierś, 8-komorowy.



Mankiety na nogi (komplet 2 szt.) 8-komorowe



Mankiet na rękę 8-komorowy



Mankiet pas na biodra i brzuch 8-komorowy



Mankiet na lewą rękę, bark i pierś 8-komorowy



Mankiet na prawą rękę, bark i pierś, 8-komorowy



Mankiet podwójny na ręce, barki i klatkę piersiową 8-komorowy



Mankiet krótkie spodnie 8-komorowy

Mankiet długie spodnie 8-komorowy









