


MAGCELL Arthro

Aparat do magnetoterapii MAGCELL Arthro

Duże dawki pulsujących pól magnetycznych, przekraczające 100mT (1000 Gauss)

» łatwe stosowanie » natychmiastowe działanie » w pełni mobilny » idealny do terapii domowej »

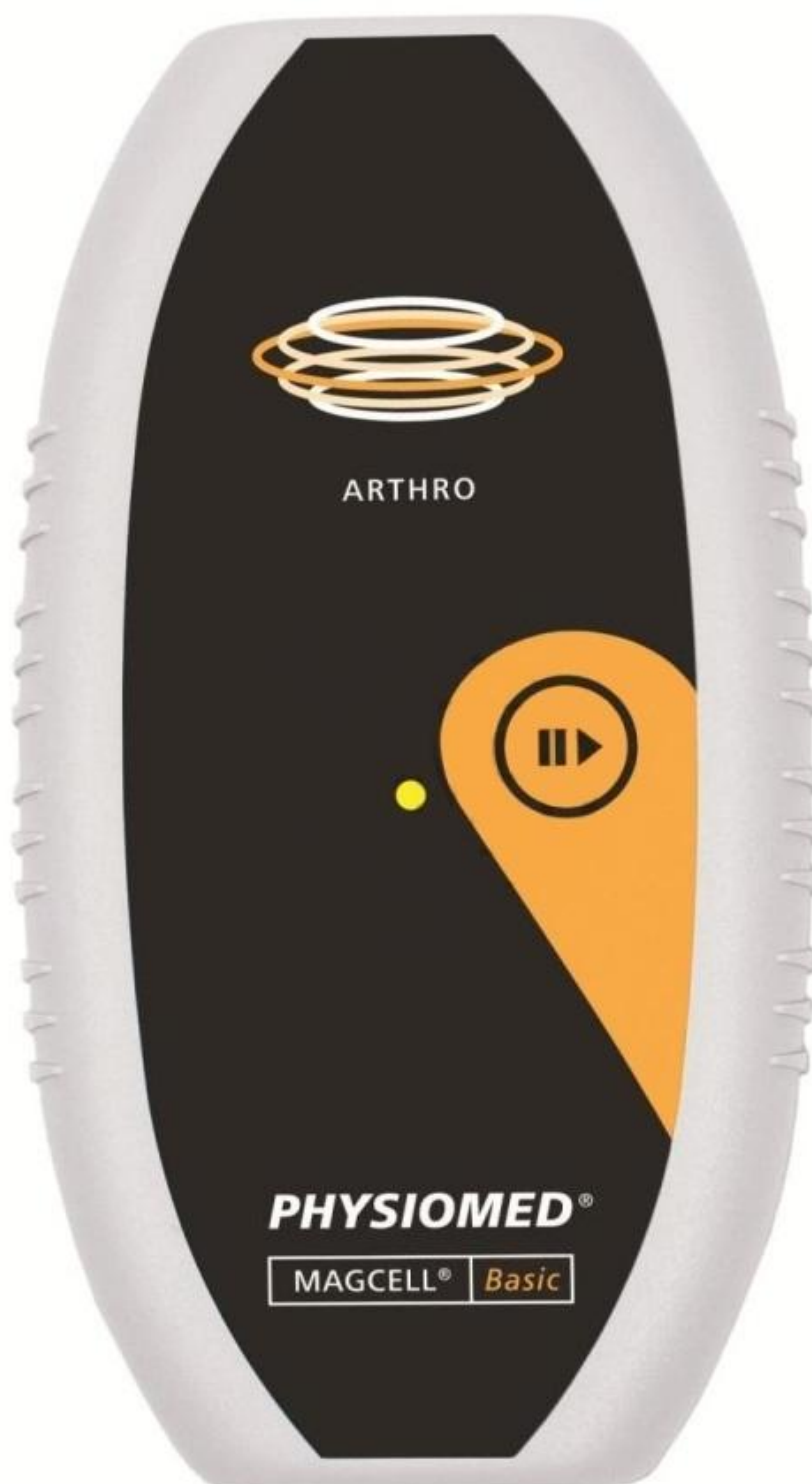

Podstawowe właściwości

MAGCELL Arthro jest niewielkim, poręcznym urządzeniem zasilanym bateryjnie. Duże dawki pulsujących pól magnetycznych, przekraczające 100mT (1000 Gauss), wytwarzane są dzięki zastosowaniu innowacyjnego opatentowanego procesu. To ok. 10x więcej niż w tradycyjnych urządzeniach do magnetoterapii. Te dawki służą do przekazywania terapeutycznych pól elektrycznych, które wzbudzone są w przewodzących tkankach i osiągają tam gęstość powyżej 10mA/cm². W przeciwieństwie do innych terapii polem magnetycznym, ten rodzaj bezprzewodowej elektroterapii, daleko wykracza poza znane dotąd progi biologicznego oddziaływania. **MAGCELL Arthro** skutecznie działa w przypadkach bólu zwyrodnieniowego po zaledwie kilku zabiegach, łagodzi stan zapalny, wspomaga metabolizm komórkowy i ułatwia ruch bez bólu. Bardzo szybko ulega poprawie zakres ruchu, postawa i możliwość poruszania się.

MAGCELL Arthro - łatwa aplikacja i pełna mobilność

Urządzenie nie posiada działań ubocznych. Ze względu na swoje niewielkie rozmiary jest mobilne, można go stosować praktycznie w każdych warunkach niezależnie od miejsca aplikacji - możliwe jest stosowanie przez ubranie, a nawet przez obuwie. Zabieg rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku **START, trwa 2,5 minuty** i przebiega w pełni zautomatyzowany sposób. O zakończeniu zabiegu informuje sygnał dźwiękowy. Aparat można zamocować na wybranej okolicy ciała za pomocą specjalnego pokrowca.



MAGCELL Arthro - zastosowanie

Terapia aparatem **MAGCELL Arthro** ma zastosowanie w leczeniu schorzeń narządu ruchu (złamania, urazy, kontuzje, przeciążenia, urazy kręgosłupa, zaburzenia metabolizmu mięśni, stany zapalne ścięgien, naciągnięcie więzadła, ból) oraz po zabiegach chirurgicznych. **MAGCELL Arthro** działa bardzo szybko w przypadkach zapalenia stawu biodrowego, kolanowego i szczękowego, haluksa oraz innych stanów zapalnych stawów. **MAGCELL Arthro** natychmiast łagodzi stan zapalny, poprawia metabolizm komórkowy i zwiększa ruchomość. Ostry ból jest znacząco zredukowany po zaledwie kilku zabiegach, co umożliwia pacjentowi ruch bez bólu. Pod wpływem działania aparatu występuje szybkie i znaczące zwiększenie zakresu ruchu i możliwości chodzenia oraz poprawa postawy ciała.

Ponadto **MAGCELL Arthro** wywołuje natychmiast zauważalne zwiększenie krążenia obwodowego nawet do 30% i tym samym pomaga zapobiegać wtórnym powikłaniom wywołanym przez obniżone krążenie tętnicze.

Zaleca się wykonywanie zabiegów codziennie, a nawet 2 razy dziennie. Czas trwania pojedynczego zabiegu to **2x2,5 minuty dla jednego stawu** (po 2,5 minuty z obu strony stawu).

MAGCELL Arthro można stosować również w weterynarii, jest odpowiedni do terapii zarówno u dużych zwierząt (np. u koni) jak i u małych.

Parametry techniczne:

- zasilanie bateryjne: 2x baterie alkaliczne, 15A LR 6 AA 1,5 V
- indukcja pola magnetycznego: max. 100mT (1000 Gauss)
- częstotliwość pola magnetycznego: 1-25 Hz
- wymiary (mm): 83 (szer.) x 25 (wys.) x 152 (dł.)
- waga: 0,21 kg

Skład zestawu:

- Aparat **MAGCELL Arthro**
- Baterie
- Pudełko metalowe (solidna metalowa obudowa z zamontowaną wkładką piankową zapewnia najlepszą ochronę urządzenia)
- Instrukcja obsługi



Dodatkowe akcesoria:

Woreczek MAGCELL z elastycznym paskiem na rzep. Praktyczna torebka do mocowania MAGCELL na część ciała, która ma być poddana terapii. Woreczek można szybko zamknąć za pomocą sznurka i następnie łatwo przymocować za pomocą elastycznego paska na rzep.





